

Exit Pocket WP mit runder Klebeöffnung

WASSERDICHTE TASCHE ZUM SCHUTZ DES KATHETERS UND DER AUSTRITTSSTELLE

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Umhüllung der Katheterextension bei Operationen mit Wasserkontakt.
- Vorgesehen für den Schutz von Kathetern aller Art.
- Geeignet für den Schutz der Austrittsstelle ohne Verband, für Kinder und für PD-Patienten.
- Erhältlich in zwei Ausführungen: **Geschlossen** oder mit einem **Öffnungs-/Schließsystem** an der Unterseite.
 - Die **geschlossene** Version wird bei längerem Kontakt mit Wasser empfohlen und ist sowohl zum Duschen als auch zum Baden und Tauchen geeignet.
 - Das Modell mit **Öffnungs-/Schließsystem** an der Unterseite der Tasche ist für gewöhnliche Hygieneverfahren geeignet. Es ermöglicht die Neupositionierung der Katheterextension und/oder der Verbände, die sie enthalten.
Diese Version sollte nicht zum Tauchen verwendet werden.

Zweck

Das Modell mit Öffnungs-/Verschlusssystem ist komplett wasserabweisend, jedoch nicht geeignet zum Eintauchen ins Wasser.

Wenn es gut positioniert ist, bewahrt es die Austrittsstelle vor Wasser und schränkt auch die bakterielle Kontamination ein.

Reinigung

1. Reinigen Sie die Haut um den Katheter vorsichtig mit kreisenden Bewegungen von innen beginnend (Abb. 1). Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
2. Trocken tupfen, ohne zu reiben.

Gebrauchsanweisung

1. Führen Sie die Extension des Katheters in die runde Öffnung ein (Abb. 2).
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Öffnung (Abb. 3).
3. Platzieren Sie den unteren Rand der Klebeöffnung in Übereinstimmung mit dem unteren Teil der Austrittsstelle. Vervollständigen Sie die Befestigung von unten nach oben. Vermeiden Sie dabei die Bildung von Falten oder Luftblasen (Abb. 4).
4. Drücken Sie die Kleberänder mit der Hand an, damit die Tasche perfekt auf der Haut haftet. Dies ist grundlegend für die Gewährleistung der Wasserdichtigkeit der Tasche. (Abb. 5).


Nur für das Modell mit Öffnungs-/Schließsystem an der Unterseite

5. Führen Sie die Hand in die Öffnung an der Unterseite der Tasche ein, um die Position der Extension des Katheters einzurichten (Abb. 6).
6. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber auf der Unterseite und drücken Sie auf die Öffnung, um ihr korrektes Schließen zu gewährleisten (Abb. 7).

Entfernung



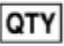







Ziehen Sie vorsichtig einen kleinen Streifen Kleber von der Haut ab und entfernen Sie behutsam mit sanften Bewegungen die gesamte Tasche. (Abb. 8).

WARNUNGEN

- Das Produkt wurde ausschließlich zum Schutz der Austrittsstelle vor Wasserkontakt entwickelt und darf daher nur für die unbedingt notwendige Zeit des Badens / Duschens / Tauchens und auf keinen Fall länger als 4 Stunden getragen werden.
- Um die Tasche vollständig mit der Haut abzudichten, muss der umgebende Bereich komplett  trocken und sauber sein.
- Bei der Handhabung des Produktes keinesfalls Cremes oder ölige Substanzen verwenden, um die Haftung nicht zu beeinträchtigen
- Um eine atraumatische Entfernung zu ermöglichen, muss der umliegende Bereich vor der Anwendung rasiert werden.
- Die Klebefläche darf nicht über Narben angebracht werden, da aufgrund der Kapillarität Wasser in die Tasche eindringen kann.
- Nach dem Auftragen unbedingt 10 Minuten warten, damit der Kleber stabil auf der Haut haftet.
- Entfernen Sie die Tasche vorsichtig und ziehen Sie nicht an der Katheter-Extension.

Der Hersteller haftet nicht für die Verwendung dieser Vorrichtung, wenn Zweck, Verwendungsmodalitäten oder Hinweise wie in dieser Anleitung angegeben, missachtet wurden.

Falls während der Verwendung des Produktes ein schwerer Unfall auftritt, muss der Benutzer dies dem Hersteller Emodial und der zuständigen Behörde des Staates melden, in dem der Benutzer ansässig ist.

Symbole auf der Verpackung		
 REF Produktcode	 Ablauf	 Einweggerät
 QTY Menge	 Hersteller	 MD Medizinisches Gerät
 LOT Stapel	 Warnungen	 Siehe Bedienungsanleitung
 CE Medizinprodukte beschweren die Verordnung (EU) 2017/745		 Nicht verwenden, wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist

Haut entfetten vor dem Aufkleben!

